

Комфорт Дропс
Змашує та заспокоює втомлені очі

ВАЖЛИВО:

Прочитайте інструкцію перед використанням. Зручні у використанні з контактними лінзами.

Комфорт Дропс володіють змашуючими та зволожуючими властивостями, що допомагає зменшити дискомфорт та подразнення очей, викликані пилом, пилком та забрудненням повітря.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Помийте, обполосніть та ретельно витріть ваші руки. Зніміть ковпак.

Нахиліть голову назад. Закрапайте одну чи дві краплі у кожне око за необхідності (раз чи два на день).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Не використовуйте, якщо оригінальна упаковка ушкоджена.
- Для уникнення зараження не торкайтеся ковпака чи інших поверхонь та уникайте прямого контакту з очима.
- Не ковтайте розчин.
- Викиньте через три місяці після відкриття.
- Зберігайте у недоступному для дітей місці.
- Зберігайте за температури 4-25 °С.
- Якщо застосування викликало дискомфорт чи будь-які проблеми, будь ласка зверніться до вашого окуліста.
- Зберігайте флакон щільно закритим, коли не користуєтеся ним.
- Використайте до закінчення терміну придатності зазначеного на упаковці та флаконі.

СКЛАД:

Полігексанід 0,0001 % м/об, гідроксипропілметилцелюлоза (ГПМЦ), етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТК), натрію фосфати, полоксамер, натрію хлорид, вода.

ПОЯСНЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ СИМВОЛІВ

Символ	Пояснення
	Виробник
	Уповноважений представник в ЄС
	Знак відповідності Директиві ЄС
	Медичний виріб
	Стерилізація методом асептичної обробки
	Не використовувати при порушенні цілісності пакування
	Не потребує спеціальних умов утилізації
	Інструкція із застосування знаходиться на зворотному боці картонної упаковки
	Засторога! Вказує на необхідність для користувача, ознайомитися з важливою інформацією в інструкції із застосування, такою як попередження і запобіжні заходи, які не можуть, з різних причин, бути розміщені на самому медичному виробі
	Дата виготовлення
	Температурний діапазон зберігання виробу
	Використати до
	Код партії



CooperVision
Hamble, SO31 4RF,
UK

КуперВіжн Хамбл,
СО31 4РФ, Велика
Британія



CooperVision CL K.
Gorcsev Iván street
7. Building C. 2360
Gyál, Hungary

КуперВіжн СЛ КФТ,
Горчев Іван Стріт 7,
білдінг С, 2360
Гуал, Угорщина

Уповноважений
представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»
вул. Багговутівська, буд.17-
21, м. Київ, 04107, Україна.
Тел. 0 800 21-52-32.
Електронна пошта:
uarep@cratia.ua

Виробнича площадка:
КуперВіжн Ленс Кеар
Лімітед
Мейс Індастріал Естеїт,
Мейс Лейн, Ешфорд, Кент,
TN24 8EP, Велика
Британія



Дата останнього перегляду Інструкції із застосування: травень 2020 р.