

Інструкція із застосування ВАЖЛИВО уважно ознайомитись з Інструкцією перед використанням

Бесконсервантний очищуючий засіб на кожен день Дельта СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЖОРСТКИХ ГАЗОНЕПРОНИКНИХ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ.

Стадія 1: Очищення

Промийте, прополощіть та ретельно висушіть руки перед тим, як взяти лінзи до рук. Помістіть кожну лінзу на долоню і нанесіть на них 2–3 краплі розчину Delta.

Обережно протирайте обидві сторони лінзи кінчиком вказівного пальця протягом 15–20 секунд.



Стадія 2: Полоскання

Прополощіть очищені лінзи розчином Delta Plus або стерильним соляним розчином.

ДОГЛЯД ЗА КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛІНЗ

Після використання контейнеру для контактних лінз ретельно прополощіть його розчином Delta Plus або стерильним соляним розчином.

Раз на тиждень ретельно очищуйте контейнер для лінз, приділяючи особливу увагу відсікам і кришкам. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЛО АБО МИЮЧІ ЗАСОБИ та залиште сушитись на повітрі.

Контактні лінзи необхідно зберігати сухими, якщо вони не використовуються та замінювати із такою частотою, як рекомендує Ваш лікар.

Стадія 3: Дезінфекція

Зніміть кришку з контейнеру для контактних лінз та помістіть ліву лінзу у лівий відсік, а праву лінзу у правий відсік контейнера, наповніть контейнер розчином Delta Plus майже по вінця та щільно закрутіть кришку. Залиште лінзи замоченими щонайменше на чотири години або на ніч. Рекомендована повторна дезінфекція лінз після тривалих періодів зберігання, тобто, через сім або більше днів.



Стадія 4: Полоскання

Після дезінфекції, ополосніть лінзи розчином Delta Plus перед одягненням. Видаліть залишки розчину на лінзах та залиште їх сушитись на повітрі.

Комфорт носіння лінз Для підвищення комфорту носіння та змочуваності лінз, можна нанести кілька крапель розчину Delta Plus на обидві поверхні лінзи перед одягненням.

Видалення білкових відкладень Деяким пацієнтам може знадобитись щотижневе застосування таблеток для видалення білкових відкладень. Будь-ласка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ НЕ ЗМІШУВАТИ З ІНШИМИ РІДИНАМИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНАКШЕ. Зажди використовуйте повний комплект систему догляду Delta для газонепроникних лінз. Не замінюйте ці засоби іншими системами. Не вводьте очищувальний розчин Delta безпосередньо в око.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед вживанням будь-яких очних лікарських засобів під час носіння контактних лінз. В разі стійкого подразнення ока, припиніть застосування, зніміть лінзи та проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Викиньте розчини Delta Plus та Delta через три місяці після відкриття.

Зберігайте усі засоби для догляду за контактними лінзами подалі від дітей.

Не знімайте кришечку з контейнера під час зберігання в ньому контактних лінз. Уникайте контакту наконечника-дозатора із будь-якими поверхнями.

Завжди закривайте пляшку ковпачком після використання.

Зберігайте за температури від 8°C до 30°C. Не заморожуйте розчин Delta.

Не ополіскуйте контактні лінзи або контейнер для лінз водою з-під крану.

Інгредієнти: Розчин Дельта Клінер (Delta) Динатрію кооамфодіацетат, вода.

Розчин для дезінфекції, замочування та зволоження Дельта Плюс (Delta Plus).

Полігексанід 0,0001 % м/об, етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТК), натрію фосфати, полоксамер, натрію хлорид, вода.

ПОЯСНЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ СИМВОЛІВ

Символ	Пояснення
	Виробник
	Уповноважений представник в ЄС
	Знак відповідності Директиві ЄС
	Медичний виріб
	Стерилізація методом асептичної обробки
	Не використовувати при порушенні цілісності пакування
	Не потребує спеціальних умов утилізації
	Інструкція із застосування знаходиться на зворотному боці картонної упаковки
	Засторога! Вказує на необхідність для користувача, ознайомитися з важливою інформацією в інструкції із застосування, такою як попередження і запобіжні заходи, які не можуть, з різних причин, бути розміщені на самому медичному виробі
	Дата виготовлення
	Температурний діапазон зберігання виробу
	Використати до
	Код партії



CooperVision
Hamble, SO31 4RF,
UK

КуперВіжн Хамбл,
СО31 4РФ, Велика
Британія



0123



UA.TR.116



CooperVision CL K.
Gorcsev Iván street
7. Building C. 2360
Gyál, Hungary

КуперВіжн СЛ КФТ,
Горчев Іван Стріт 7,
білдінг С, 2360
Гуал, Угорщина

Уповноважений
представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»
вул. Багговутівська, буд.17-
21, м. Київ, 04107, Україна.
Тел. 0 800 21-52-32.
Електронна пошта:
uarep@cratia.ua

Виробнича площадка:
КуперВіжн Ленс Кеар
Лімітед
Мейс Індастріал Естеїт,
Мейс Лейн, Ешфорд, Кент,
TN24 8EP, Велика
Британія

Дата останнього перегляду Інструкції із застосування: травень 2020 р.