

Інструкція із застосування **ВАЖЛИВО** уважно ознайомитись з інструкцією перед використанням

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОЗЧИН ХАЙ-КЕА З ПРИРОДНОЮ ЗМАЗКОЮ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Для використання із м'якими контактними лінзами, включаючи силікон-гідрогелеві.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Очищення, дезінфекція, зберігання, зволоження, змащування, полоскання та зняття нальоту.

ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ПРОБЛЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НОСІННЯМ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ, СПРИЧИНЕНІ НЕДОТРИМАННЯМ ЧІТКИХ ІНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОВОДЖЕННЯ З ЛІНЗАМИ.

Не замінійте розчини, рекомендовані Вашим лікарем.

З метою уникнення проблем та забезпечення комфортного носіння лінз необхідно щодня дотримуватись стадій 1, 2 і 3.

СТАДІЯ 1 – ОЧИЩЕННЯ

Промийте, прополощіть та висушіть руки перед тим, як взяти лінзи до рук. Помістіть кожну лінзу на долоню і нанесіть на них кілька крапель універсального розчину.

Обережно протирайте обидві сторони лінзи кінчиком вказівного пальця протягом 15 – 20 секунд.

СТАДІЯ 2 – ПОЛОСКАННЯ

Після очищення, прополощіть свої лінзи універсальним розчином.

СТАДІЯ 3 – ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Зніміть кришку з контейнеру для контактних лінз та помістіть ліву лінзу у лівий відсік, а праву лінзу у правий відсік контейнера, наповніть контейнер універсальним розчином майже по вінця та щільно закрутіть кришку. Залиште лінзи замоченими щонайменше на чотири години або на ніч.

Рекомендована повторна дезінфекція лінз після тривалих періодів зберігання, тобто, через сім або більше днів.

ДОГЛЯД ЗА КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛІНЗ

Після використання контейнеру для контактних лінз, ретельно прополощіть його універсальним розчином або стерильним сольовим розчином та залиште сушитись на повітрі. Не використовуйте мило або миючі засоби. Коли контейнер не використовується його слід тримати сухим, та регулярно міняти згідно з рекомендаціями лікаря. Не ополіскуйте контактні лінзи або контейнер для лінз водою з-під крану.

КОМФОРТ НОСІННЯ ЛІНЗ

Для підвищення комфорту носіння та змочуваності лінз, можна нанести кілька крапель універсального розчину на обі поверхні лінзи перед одяганням.

НЕ ЗМІШУВАТИ З ІНШИМИ РІДИНАМИ.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед вживанням будь-яких ліків під час носіння контактних лінз.

- Не використовуйте лінзи в разі пошкодження гарантійної пломби.
- В разі стійкого подразнення ока, негайно припиніть застосування, зніміть лінзи та проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
- Видаліть вміст пляшки через три місяці після відкриття.
- Зберігайте усі засоби для догляду за лінзами подалі від дітей.
- Не знімайте кришечку з контейнера під час зберігання в ньому контактних лінз.
- Уникайте контакту наконечника-дозатора із будь-якими поверхнями.
- Завжди закривайте пляшку ковпачком після використання.
- Зберігайте за температури від 4°C до 30°C.
- Не ополіскуйте контактні лінзи або контейнер для лінз водою з-під крану.
- Контейнер для лінз необхідно регулярно очищувати та замінювати з такою частотою, як рекомендовано Вашим лікарем.
- Щоб гарантувати відсутність загрози для безпеки очей, ніколи не використовуйте розчин повторно.
- Якщо лінзи зберігаються у розчині більше 7 днів, рекомендується повторити процедуру дезінфекції.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказаного на пляшці або картонній упаковці.
- Під час дезінфекції завжди зберігайте лінзи у вертикальному положенні та у безпечному місці (подалі від дітей).

СКЛАД:

Полігексанід 0,00013 % м/об, натрію гіалуронат 0,01 % м/об, натрію хлорид, натрію фосфати, полоксамер, етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТК), вода.

ПОЯСНЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ СИМВОЛІВ

Символ	Пояснення
	Виробник
	Уповноважений представник в ЄС
	Знак відповідності Директиві ЄС
	Медичний виріб
	Стерилізація методом асептичної обробки
	Не використовувати при порушенні цілісності пакування
	Не потребує спеціальних умов утилізації
	Інструкція із застосування знаходиться на зворотному боці картонної упаковки
	Засторога! Вказує на необхідність для користувача, ознайомитися з важливою інформацією в інструкції із застосування, такою як попередження і запобіжні заходи, які не можуть, з різних причин, бути розміщені на самому медичному виробі
	Дата виготовлення
	Температурний діапазон зберігання виробу
	Використати до
	Код партії



CooperVision
Hamble, SO31 4RF,
UK

КуперВіжн Хамбл,
СО31 4РФ, Велика
Британія



0123



UA.TR.116



CooperVision CL K.
Gorcsev Iván street
7. Building C. 2360
Gyál, Hungary

КуперВіжн СЛ КФТ,
Горчев Іван Стріт 7,
білдінг С, 2360
Гуал, Угорщина

Уповноважений
представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»
вул. Багговутівська, буд.17-
21, м. Київ, 04107, Україна.
Тел. 0 800 21-52-32.
Електронна пошта:
uarep@cratia.ua

Виробнича площадка:
КуперВіжн Ленс Кеар
Лімітед
Мейс Індастріал Естеїт,
Мейс Лейн, Ешфорд, Кент,
TN24 8EP, Велика
Британія

Дата останнього перегляду Інструкції із застосування: травень 2020 р.